

## Pressemitteilung 01/2021

### Neues Kälber Handlingtool: Der CalfFixx HEAD

In der Praxis ist das Problem bekannt, nachdem man die erste Ohrmarke beim Kalb eingezogen hat, wehrt es sich meist beim Einziehen der zweiten Ohrmarke. Wenn die Ohrmarken jedoch durch die unkontrollierten Kopfbewegungen zu nah am Ohrrand sitzen besteht die Gefahr, daß sie leicht wieder ausreißen können.

Mit dem CalfFixx Kopfhaltbügel kann der Kopf des Kalbes sehr sicher fixiert werden. Durch die instinktive Rückwärtsbewegung fixiert sich das Kalb quasi von selbst! Das ermöglicht ein rasches und stressfreies Einziehen beider Ohrmarken an optimaler Stelle zwischen den beiden Knorpelleisten, das Risiko eines frühzeitigen Ausreißen der Ohrmarken wird auf ein Minimales reduziert.

Bewährt hat sich der Bügel auch bei der Blutentnahme von Kälbern zu den unterschiedlichsten Diagnostizwecken. Durch das Anlegen des CalfFixx erhält man eine Streckung des Hälberhalses, das einen optimalen Zugang zur Halsvene verschafft.

Weitere Informationen zum CalfFixx erhalten Sie unter [www.bovitools.com](http://www.bovitools.com) oder bei unserem Vertriebspartner Quidee GmbH in Homberg (Ohm), Tel. +49-6633/9110857 oder unter [www.quidee.de](http://www.quidee.de) .

Bild 1: Ohrmarken mit dem CalfFixx



Bild 2: Blutentnahme mit dem CalfFixx

